

안심진료소 Influenza A&B Antigen Test 검사안내

검사	COVID-19	Influenza A&B
검사명/검사코드	COVID-19[원내] / D6584040	[응급실, 중환자실 전용] Influenza A&B Antigen Test(정밀) / D6612000
검체	기존과 동일	비인두 도말
검체 채취방법	기존과 동일	검체 채취
		 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; padding-left: 10px;"> COVID-19 비인두 도말 채취 방법과 동일 </div>
		검체 혼합액 준비과정
		① 비인두 도말 검체가 묻은 스왑을 전용용기 추출용액에 담그고 5회 이상 휘저음  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ② 전용용기 양옆을 누르고 스왑을 천천히 빼서 스왑에 흡수된 검체 혼합액을 충분히 짜냄(★중요) ③ 사용된 스왑은 적색(격리)의료폐기물통에 폐기 ④ 전용용기 캡을 씌움 </div>
바코드 부착방법	기존과 동일	① 바코드 2장 출력(1장은 전용용기+1장은 락앤락 운반통) 
포장 및 운반방법	COVID-19와 Influenza A&B 동시 처방시 2중 지퍼백과 전용운반통을 이용하여 운반	
		
	① 지퍼백(小)에 검체 포장 ② 지퍼백(中)에 검체 2중 포장 ③ 락앤락통에 검체 3중 포장 ④ 락앤락통에 출력된 COVID-19 바코드 1장, Influenza A&B 바코드 1장을 붙여서 3층 검사실에 접수	
문의 전화	진단검사의학팀 접수부 ☎ 5948	